



Catálogo
accesibilidad en piscinas
AQ LIFT

AQ LIFT PK

ELEVADOR HIDRÁULICO PORTÁTIL

ES EL ELEVADOR HIDRÁULICO PORTÁTIL MÁS PEQUEÑO, DISCRETO Y ELEGANTE DEL MERCADO.

Se puede retirar y colocar al instante, para guardarlo cuando no se necesita, además de dar servicio a varias piscinas del mismo recinto.

CARACTERÍSTICAS

Usuario autónomo. Se puede accionar tanto desde el exterior como desde el interior de la piscina gracias a su doble mando.

Homologado para elevar hasta 150 kg. Siendo necesario una toma de agua con una presión entre 3.5 y 5.5 bar.

Adaptable al perfil de la piscina. Disponibles diferentes medidas de anclajes para sortear posibles obstáculos. (canal desbordante, tuberías, etc.)

Posibilidad de giro izquierdo. Bajo pedido.

Soporte de almacenamiento. Incluye un soporte para facilitar su almacenaje en períodos de no uso.



ACERO INOX.
AISI 316L.



Radio
de giro



Ángulo de
giro



Recorrido de
asiento



Capacidad de
elevación




Presión
mínima



Neto



Embalado

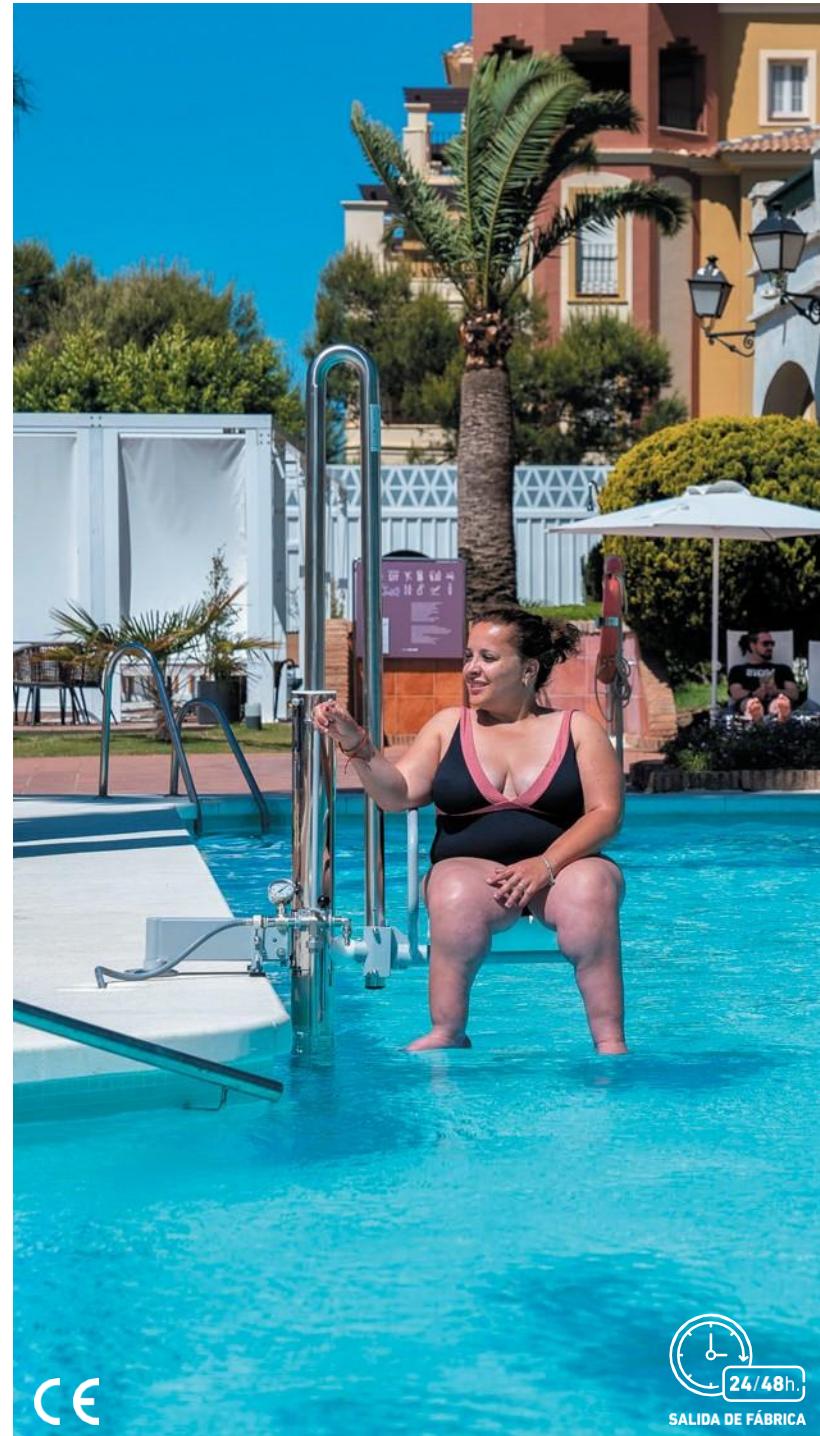

SALIDA DE FÁBRICA



A TENER EN CUENTA



Profundidad mínima requerida 0,90 m.

MÍNIMO 0,90 M



Si la diferencia entre el borde de la piscina y la lámina de agua es superior a 15 cm. Consultar.

>15 CM / AVISAR




Asiento regulable en dos alturas: 500 o 550 mm.

500 / 550



Indicar en caso de piscina de liner o poliéster para añadir el complemento de protección.

LINER / POLIESTER

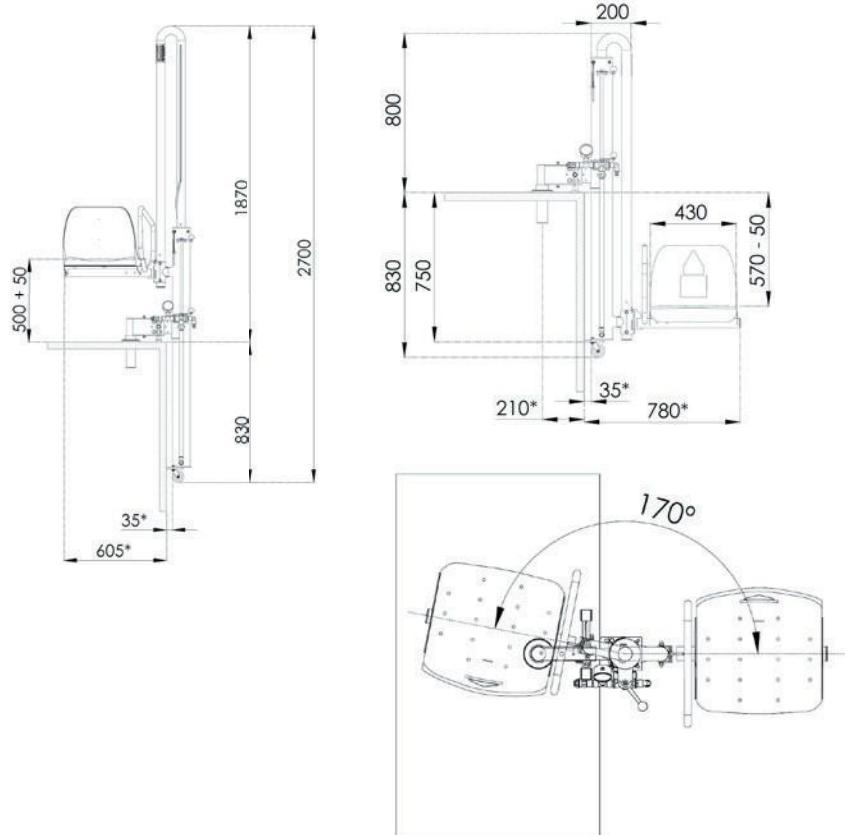

Cotas en mm.

*Cotas dependiente de la cota de 35mm, es decir, de la distancia de la pared interna de la piscina al cilindro elevador.



Anclaje medida especial



Complementos opcionales



AQ LIFT B-2

ELEVADOR HIDRÁULICO FIJO - DESMONTABLE

ES EL ELEVADOR HIDRÁULICO MÁS ESTABLE DEL MERCADO.

La barandilla y sus cinco puntos de apoyo aportan al usuario una máxima sensación de seguridad.

Se deja fijo durante toda la temporada de baño y lo pueden quitar para guardarla en invierno.

CARACTERÍSTICAS

Usuario autónomo. Se puede accionar tanto desde el exterior como desde el interior de la piscina gracias a su doble mando.

Fijo-desmontable. Está diseñado para colocarlo durante la temporada de baño, con la opción de retirarse para guardarla en invierno.

Homologado para elevar hasta 150 kg. Siendo necesario una toma de agua con una presión de entre 3.5 y 5.5 bar.

Posibilidad de giro izquierdo. Bajo pedido.

Válido para cualquier piscina. Su versatilidad hace que se pueda ajustar a distintas posiciones y graduar tanto el elevador como la altura del asiento.



ACERO INOX.
AISI 316L.



Radio
de giro



Ángulo de
giro



1,06 m
Recorrido de
asiento



150 kg
Capacidad de
elevación



3,5 bar
Presión
mínima



48 kg
Neto



64 kg
Embalado



SALIDA DE FÁBRICA



A TENER EN CUENTA



Profundidad mínima requerida 1,20 m.

MÍNIMO 1,20 M



La barandilla se puede cortar hasta 50 cm.

HASTA 50 CM




En el caso de que no se pueda anclar el pie de apoyo, NO se podrá utilizar el elevador para una capacidad de elevación superior a 120 kg.



La altura del asiento se puede graduar de forma libre.

ALTURA
GRADUAL

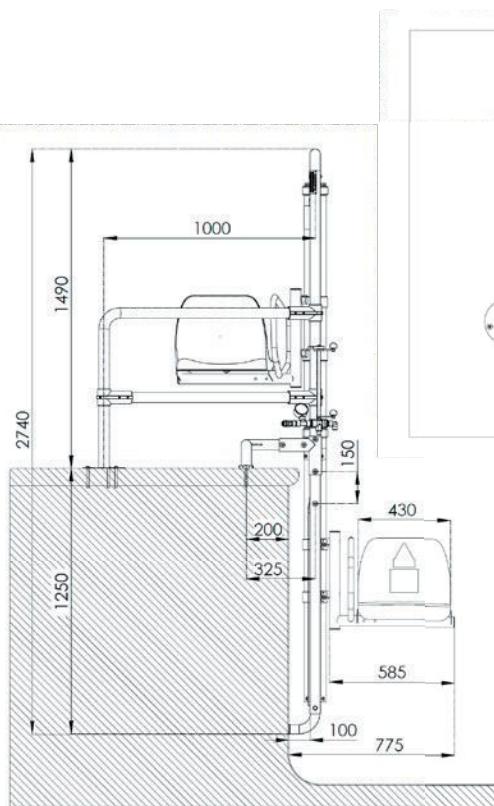

Cotas en
mm.



Toma de agua



Usuario autónomo



Asiento desmontable

AQ LIFT 400

ELEVADOR DE BATERÍA PORTÁTIL

NO REQUIERE NINGUNA INSTALACIÓN.

Lo que permite utilizarlo en cualquier punto de la piscina y guardarlo cuando no esté en uso.



CARACTERÍSTICAS

Usuario autónomo. El usuario solo tiene que pulsar los botones del mando, pudiendo hacerlo en el exterior o interior del agua.

Sin instalación. Solo hay que colocarlo donde se quiera usar, evitando realizar taladros en las inmediaciones de la piscina.

Transportable. En pavimento liso, se transporta de forma sencilla gracias a sus 4 ruedas. Además, el asiento es desmontable.

Fabricado en Acero inox. Aisi 316L con protección de pintura en polvo.

Homologado para elevar hasta 120 kg o 150 kg.

Mecanismo de seguridad. Evitando que el elevador funcione cuando no está activado.

Incluye: Reposapiés y reposabrazos abatible.



MECANISMO ELÉCTRICO

Actuador eléctrico de 24V / Caja de control / Botonera de mano Dos baterías / Cargador de la batería / Protección IP65.



ACERO INOX.
AISI 316L.



Recorrido
de asiento



200 kg



Neto



Embalado



Lista para
su uso

123 x 82 x 147 cm



SALIDA DE FÁBRICA

24/48h.



A TENER EN CUENTA



Con un buen uso, cada batería tiene una autonomía de unos 25-30 servicios.
Garantía de las baterías 2 años.

AUTONOMÍA 25 / 30



Disponible (opcional) funda de protección.

FUND A





Se suministra con 2 baterías para que una pueda estar en carga mientras la otra está en uso.

DOS BATERÍAS



El tiempo de carga de las baterías es de 4-5 horas.

4 / 5 HORAS

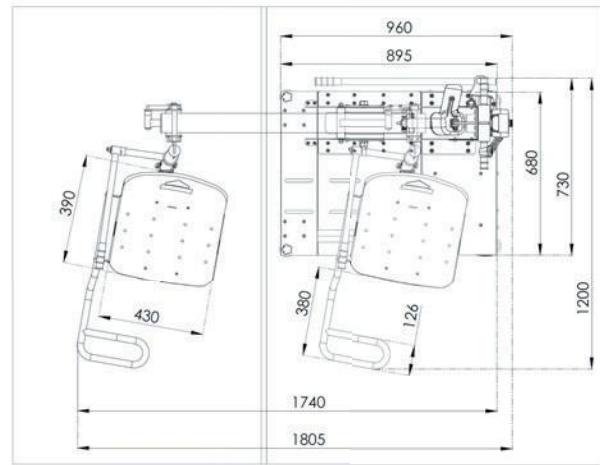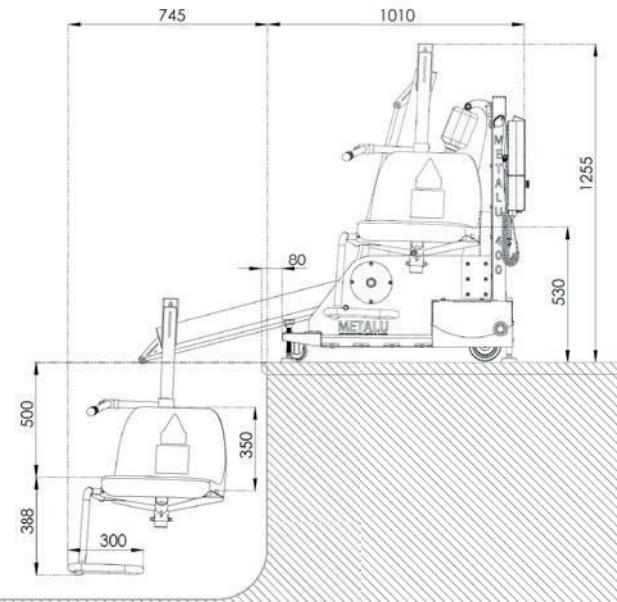

Cotas en
mm.



Usuario autónomo



Mecanismo de seguridad

AQ LIFT 600

ELEVADOR DE BATERÍA FIJO - DESMONTABLE

IDEAL PARA LUGARES DONDE NO HAY SUFICIENTE PRESIÓN DE AGUA O DÓNDE NO SE QUIERA REALIZAR LA PREINSTALACIÓN DE LA TOMA DE AGUA.



CARACTERÍSTICAS

Usuario autónomo. El usuario solo tiene que accionar los botones del mando, pudiendo hacerlo en el interior y en el exterior del agua.

Fácil instalación. La instalación de METALU 600 solo requiere fijar la base mediante unos tacos anclados al suelo.

Fijo-desmontable. Puede colocarse al comienzo de la temporada de baño y guardarla cuando no se vaya a usar. También, cuenta con un asiento desmontable.

Fabricado en Acero inox. Aisi 316L con protección de pintura en polvo.
Homologado para elevar hasta 120 kg o 150 kg. Incluye:

Reposapiés y reposabrazos abatible.



MECANISMO ELÉCTRICO

Actuador eléctrico de 24V / Caja de control / Botonera de mano Dos baterías / Cargador de la batería / Protección IP65.



ACERO INOX.
AISI 316L.



Recorrido
de asiento
1,10 m



Neto



Embalado



Listo para
su uso



EMBALAJE

123 x 82 x 147 cm



CE
SALIDA DE FÁBRICA



A TENER EN CUENTA



Con un buen uso, cada batería tiene una autonomía de unos 25-30 servicios.

Garantía de las baterías 2 años.

AUTONOMÍA 25 / 30



Disponible (opcional) funda de protección.

FUND A





Se suministra con 2 baterías para que una pueda estar en carga mientras la otra está en uso.

DOS BATERÍAS




El tiempo de carga de las baterías es de 4-5 horas.

4 / 5 HORAS

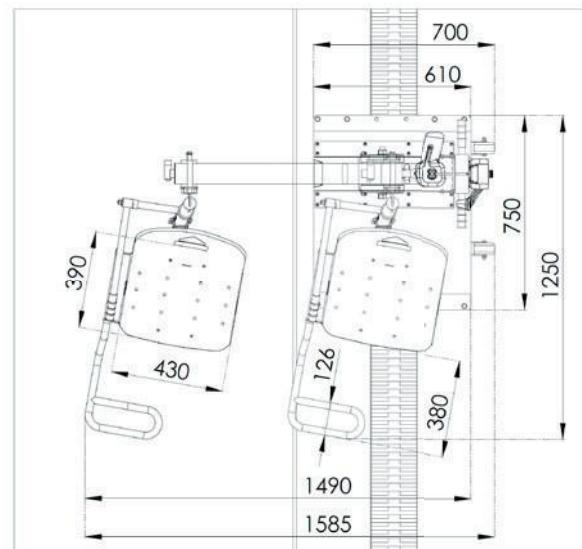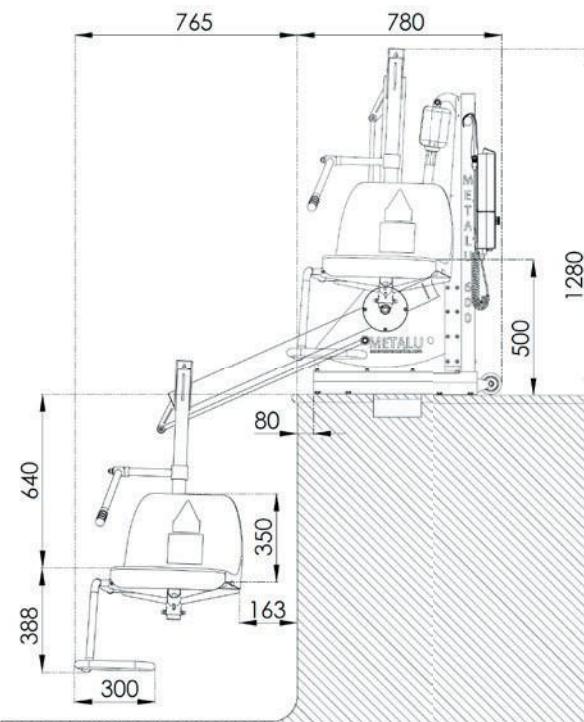

Cotas en mm.

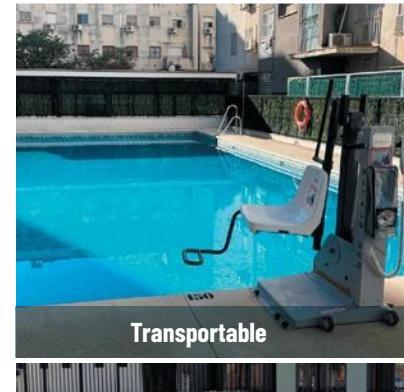

Asiento desmontable



multielevación
eleva tu calidad de vida

900 103 673

info@multielevacion.com